

COME INDOSSARE IN MODO CORRETTO UN FACCIALE FILTRANTE FFP1, FFP2 o FFP3

Per indossare in modo corretto un facciale filtrante è importante seguire alcune regole, altrimenti questo dispositivo, usato per ridurre il rischio di contagio, "invece di proteggerci può diventare una fonte di infezione a causa dei germi che potrebbero depositarsi sopra".

Se possibile, FARE RIFERIMENTO ALLE ISTRUZIONI FORNITE DAL PRODUTTORE.

UNA VALIDA PROTEZIONE SI OTTIENE SOLO SE IL DISPOSITIVO È INDOSSATO CORRETTAMENTE!
SEGUIRE LE MODALITÀ DI INDOSSAMENTO E VERIFICARE LA TENUTA DEL DISPOSITIVO AL VOLTO

PRIMA DI INDOSSARE IL FACCIALE FILTRANTE

Pulire le mani. Prima di toccare un facciale filtrante pulito, lavare con cura le mani con un disinfettante a base di alcol o con acqua e sapone.

- Una volta applicato il sapone sulle mani bagnate, massaggiarle una contro l'altra per almeno una ventina di secondi prima di risciacquarle.
- Usare sempre un tovagliolo di carta pulito per asciugare le mani per poi gettarlo nella spazzatura.



Controllare la mascherina. Una volta che hai preso un facciale filtrante dalla sua confezione, verificare che non ci siano difetti e che non siano presenti buchi o strappi nel materiale.

Se il facciale filtrante è difettoso, buttarlo via e prenderne uno nuovo.

COME INDOSSARE IL FACCIALE FILTRANTE



Tenere la mascherina con lo stringinaso verso le dita lasciando gli elastici liberi sotto la mano.



Posizionare la mascherina sul volto con la conchiglia sotto il mento e lo stringinaso verso l'alto.



Posizionare gli elastici secondo le indicazioni del fabbricante assicurando che la mascherina aderisca correttamente al viso lungo tutto il bordo

NOTA: la presenza di barba o basette lunghe non permettono il contatto fra il volto e i bordi della mascherina, limitando la tenuta.



Premere lo stringinaso e modellarlo affinché aderisca perfettamente seguendo la curvatura del naso




La tenuta della mascherina sul viso deve essere verificata prima di entrare nell'area di utilizzo.

La prova consiste, una volta indossata la mascherina:

- Inspirare: la maschera deve collassare (cedere verso il viso)
- Espirare: controllare eventuali perdite dai bordi (nel caso sia presente la valvola di sfiato l'aria uscirà da quest'ultima)

FACCIALI FILTRANTI CON E SENZA VALVOLA DI ESPIRAZIONE

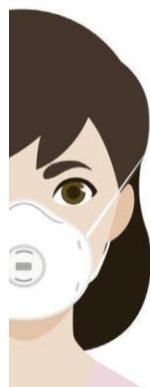

**FFP2 e FFP3
CON VALVOLA**

ADATTI A PROTEGGERE CHI LE INDOSSA
DALL'AMBIENTE ESTERNO

NON PROTEGGONO L'AMBIENTE CIRCOSTANTE
DA EVENTUALI PARTICELLE ESPULSE (AEROSOL)
DA CHI LE INDOSSA

Comfort maggiore: ideali nel reparto malattie
infettive o terapia intensiva dove sono
presenti pazienti affetti da Covid-19.

**FFP2 e FFP3
SENZA VALVOLA**

ADATTI A PROTEGGERE CHI LE INDOSSA
DALL'AMBIENTE ESTERNO

PROTEGGONO L'AMBIENTE CIRCOSTANTE
TRATTENENDO EVENTUALI PARTICELLE (AEROSOL)
DI CHI LE INDOSSA

In ospedale, nelle case di riposo,
ideali nelle attività di assistenza e cura dei pazienti
infetti o potenzialmente infetti da Covid-19.

(1) Fonte: OMS - Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease 2019 (COVID-19) - Interim guidance 27 February 2020; Advice on the use of masks in the community, during home care, and in health care settings in the context of COVID-19. Interim guidance 19 March 2020.

Nota: La protezione respiratoria deve essere abbinata all'uso di altri DPI ove necessario



Fonte: ASSOSISTEMA ASSOSISTEMA SAFETY

IMPORTANTE!

Ai fini anti-contagio da COVID-19 i facciali filtranti **con valvola di espirazione** non impediscono la contaminazione esterna. Pertanto, ad essi **dovrà essere sovrapposta una mascherina chirurgica o analoga.**

